

住友ペークライトのフェイスシールド  
**STPフェイスガード**



用 途

- 飛沫からの防護。

特 長

- フェイスシールドは医療用ゴーグルやサングラス用にも使用されるポリカーボネート樹脂シートを採用しています。ゆがみ無く軽量で透明性等の光学特性に優れます。
- ヘッドバンドには工業用ヘルメットの内部に採用しているホルダーの技術を応用し、細やかなサイズの調整が可能です。ボタンをワンブッシュすることでホルダーを緩めることができます。
- フェイスシールドは「使い捨て」ヘッドバンドは「リユース」品です。



製品番号	1セットの構成	仕様(サイズ/重量)	JANコード	定価(税別)
ST-001	ヘッドバンド1個 フェイスシールド3枚	W240X240/66g	4560339129415	1,800円

**ST-001スペアシールド**

W240XH240 (mm) 14g/1枚  
 交換用クリップ 1セット (調整用パッド6個、取付クリップ2個)  
 JANコード: 4560339129422  
 10枚入り: 定価(税別) 1,500円



## STPフェイスガード 取扱説明書

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構造

ヘッドバンド<sup>®</sup>（リユース） フェイスシールド<sup>®</sup>（使い捨て）



#### 2. 種類

本品は、以下の種類がある。

製品番号	ヘッドバンド (リユース)	フェイスシールド (使い捨て)
ST-001	1個	3枚

#### 3. 材質

部材名	材質
ヘッドバンド	ポリエチレン樹脂
クリップ	EPDM ナイロン、EVA
フェイスシールド	ポリカーボネート

#### 【使用方法等】

1. 本品の内容を確認する。本品の内容は以下のとおり。

- ・ヘッドバンド 1個
- ・フェイスシールド 3枚

ヘッドバンドはフェイスシールド3枚分、消毒して繰り返し使用する。

2. 写真1の通りフェイスシールドの両面のカバーフィルムを剥がす。



写真1

3. ヘッドバンドとフェイスシールドを写真2のように持ち、クリップ先端と穴の位置を合わせる。

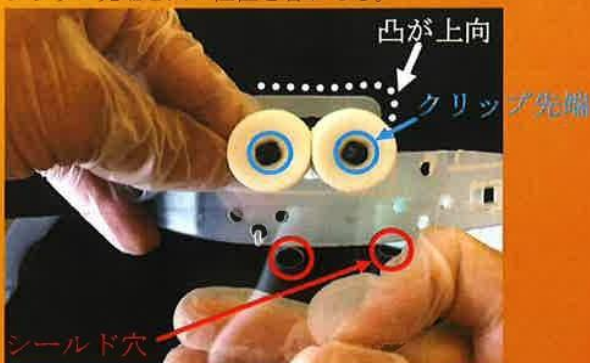


写真2

4. 写真3の通りフェイスシールドの穴をクリップ先端に差込み「カチカチ」と音が鳴るまでしっかり押し込む。



写真3

5. 写真4の通り凸部分2箇所が上を向いた状態で4箇所を手順3,4に従って確実に固定する。



写真4

6. バンドを額から後頭部下側に巻き付けて頭に装着する。右手の親指と人差し指を頭寸調整穴に掛け、締め込んで調整する。解除ボタンを押してバンドの固定位置を調整できる。



7. 使用後に頭から取り外した後にフェイスシールドをヘッドバンドから取り外し廃棄する。

8. ヘッドバンドは再装着する前に洗浄及び消毒をして、新しいフェイスシールドに2~6の手順に従って装着する。

#### 【消毒方法】

1. ヘッドバンドの消毒は手袋を装着したままの状態でもアルコール又は0.05%次亜塩素酸を浸透させたペーパータオルやガーゼ等を利用して拭いて消毒する。
2. 0.05%次亜塩素酸で消毒した場合、水またはアルコールで拭き、残留物を取り除く。
3. 清潔な吸収性タオルを用いて吸水するなど乾燥させる。
4. 手袋を外した後は、手指の衛生を行う。

#### 【使用上の注意】

1. 目に見えて汚れた場合は洗浄、消毒を行うこと。汚れにより感染の原因になる。
2. ヘッドバンドの消毒にアルコールや、0.05%次亜塩素酸以外の消毒剤を使用しないこと。クリップが変形してフェイスシールドが簡単に外れる可能性がある。
3. フェイスシールド10枚使用を目的にスペアシールド付属のクリップに交換をお勧めします。
4. ヘッドバンドをオートクレーブ滅菌しないこと。変形の可能性がある。



安全性・機能性・快適性・ファッション性を追求  
頭の先から足元まで 安全衛生保護具全般

株式会社 キューヘル

〒814-0123 福岡市東区長尾1丁目4番20号  
TEL:092-871-1301(TEL) FAX:092-871-1303  
e-mail:kyuhel0539@bulb.co.jp  
HP:https://www.kyuhel.com/